



Instrukcja pobierania, przechowywania i transportu próbek z biologicznymi wskaźnikami kontroli skuteczności procesu sterylizacji (sporal A, sporal S)

Zasady ogólne:

- Badanie ma na celu potwierdzenie skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem lub parą wodną
- Częstość wykonywania badań kontrolnych określa Zleceniodawca
- Do testów użytych do kontroli urządzenia sterylizacyjnego należy każdorazowo dostarczyć jeden test kontrolny nie poddany sterylizacji celem wykonania posiewu kontrolnego
- Wskaźnik kontrolny musi być z tej samej serii, co test badany
- Opłata za badanie może być dokonana w opłatomacie IPCZD lub przelewem na konto szpitala

Transport i przechowywanie:

- Po zakończeniu procesu sterylizacji test należy umieścić w papierowej kopercie
- Materiał dostarczyć do Rejestracji Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w ciągu 24 godzin od zakończenia procesu sterylizacji (Blok A, 1 piętro)
- Do czasu dostarczenia, testy przechowywać w temperaturze pokojowej i chronić przed zawilgoceniem
- Do testów należy dołączyć wypełniony druk zlecenia na badanie (dodatkowy plik)